

## ISTRUZIONI PER L'USO



### MASCHERINA FACCIALE PER USO MEDICO – LAVABILE

#### TIPO IIR modello MC.001.005

**Mascherina speciale resistente agli spruzzi, protegge contro sangue e fluidi corporei. Idonea per un utilizzo in sala operatoria o altre condizioni simili**

#### **Dispositivo Medico T0206 secondo nomenclatura CND**

Direttiva 93/42/CEE – D. Lgs. 46/97

### DESCRIZIONE GENERALE

La mascherina per uso medico MC.001.005 è progettata per ridurre al minimo il trasferimento di microrganismi patogeni e particelle dal personale sanitario al paziente. È inoltre in grado di ridurre la possibilità di contagio per via respiratoria, se indossata da una persona malata.

La mascherina per uso medico MC.001.005 è stata studiata per garantire un elevato livello di protezione combinato con un buon comfort, sulla base della norma internazionale UNI EN 14683 (versione 2019).

È idonea per un utilizzo in sala operatoria o altre condizioni simili, offrendo una speciale resistenza e protezione contro gli spruzzi di sangue e fluidi corporei. In particolari situazioni di epidemia o pandemia può essere utilizzata anche da altre persone per ridurre il contagio interpersonale.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

La mascherina MC.001.005 è LAVABILE e RIUTILIZZABILE. Non contiene lattice. Non è sterile. È realizzata in tessuto non tessuto (100 % polipropilene) idrorepellente e traspirante.

### COME INDOSSARE LA MASCHERINA

- *Maneggiare la mascherina con mani perfettamente pulite*
- *Inserire le dita fra gli elastici auricolari*
- *Sistemare la mascherina sul viso accertandosi di coprire naso e bocca e la punta del mento*
- *Posizionare gli elastici attorno alle orecchie*
- *Tirare la mascherina chirurgica dall'alto e dal basso per distendere completamente le pieghe*
- *Durante l'uso non toccarla con le mani o con materiale potenzialmente contaminato*
- *Sostituire la mascherina se contaminata o quando diventa umida con la respirazione*
- *Smaltire la mascherina usata secondo le norme vigenti (come rifiuto sanitario a rischio biologico se è contaminata)*

### CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare nel caso di evidenti danni o difetti (buchi, strappi, elastici staccati ecc.).

### CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura ambiente, senza esporre ad umidità o calore diretto.



## MANUTENZIONE

Le mascherine sono riutilizzabili e possono essere lavate fino a 30 volte prima di smaltirle del tutto.

Il lavaggio della mascherina deve essere effettuato secondo le seguenti indicazioni:

1. Immergere la mascherina in un recipiente contenente una soluzione a base di cloro con diluizione allo 0,1%
2. lasciarla immersa per 10 minuti
3. toglierla ed immergerla in un secondo recipiente contenente acqua pulita e risciacquare abbondantemente
4. toglierla, strizzarla leggermente ed immergerla in un recipiente contenente acqua pulita (se si utilizza lo stesso recipiente del punto 3 sostituire l'acqua già utilizzata per il primo risciacquo)
5. lasciare asciugare completamente senza l'uso di asciugacapelli o asciugatrice.

**Note:** Tra i prodotti a base di cloro attivo c'è la comune candeggina, o varechina, che in commercio si trova al 5-10% di contenuto di cloro.

### **Come arrivare alla diluizione dello 0,1% in cloro attivo:**

leggere bene l'etichetta del prodotto verificando la percentuale di cloro e poi diluirlo in acqua nella giusta misura.

Ecco degli esempi:

Se utilizziamo un prodotto con cloro al **5%** per ottenere la giusta percentuale di **0,1%** di cloro attivo bisogna diluirlo così:

✚ 100 ml di prodotto (al 5%) in 4900 millilitri di acqua

oppure

✚ 50 ml di prodotto (al 5%) in 2450 millilitri di acqua

## SMALTIMENTO

Se contaminato, smaltire dopo l'uso come un rifiuto biologico infettivo.